



Cleanic™

Ein-Schritt-Prophypaste

Cleanic™ ist eine Ein-Schritt-Prophy-Paste mit einem niedrigen RDA Wert von 21, die Ihrem Patienten hervorragende Reinigungs- und Politurresultate bei geringer Abrasion der Zähne in einem Schritt garantiert, und zwar aufgrund der klinisch bewährten integrierten Abrasionsvariabilität von natürlichen Perlit-Partikeln.



All In One

Universal Reinigungs- und Politurpaste



Patentierte Perlit-Technologie

Mit integrierter Abrasionsvariabilität



Wissenschaftlich bewiesen

Effektive Reinigung und Politur mit geringer Abrasion von Schmelz und Dentin



Zeitersparnis

Von der Reinigung zur Politur in einem Schritt

Wo traditionelle Prophypasten versagen...

Traditionelle Pasten, normalerweise auf Bimssteinbasis, sind aggressiv gegenüber Schmelz, Dentin und Füllungen; dies verursacht:

- **Verfärbungen und Bildung von Zahnstein**
- **Kratzer an Schmelz und Dentin**
- **Unnötige Beschädigung von Hartgewebe**
- **Palpierbaren Gewebeverlust im Laufe der Zeit**

Sie erfordern außerdem den doppelten Aufwand, da mindestens zwei Pasten mit unterschiedlicher Körnung für effektives Arbeiten benötigt werden. Dies führt häufig dazu, dass die Politur bei der Behandlung weggelassen wird, um Zeit zu sparen, wobei die verbleibende unpolierte Oberfläche mit der Zeit verfärbt wird und sich dort neue Plaque ansammelt.

Was ist anders mit Cleanic?

Cleanic ist **eine Ein-Schritt-Prophypaste für Reinigung und Politur**, die auf der Perlit-Technologie basiert.

Dies bedeutet schonende, aber effiziente Reinigung und Politur, **alles in einer Sitzung** und mit nur einer Paste.

Verfügbar **in 5 Geschmacksrichtungen**.


 **Berry Burst**  **Mint**  **Light**

 **Green Apple**  **Mint ohne Fluorid**



Integrierte Abrasionsvariabilität

Die vulkanischen Perlit-Partikel (natürliches Siliziumoxid) passen ihre Abrasivität im Laufe Ihrer Behandlung an.

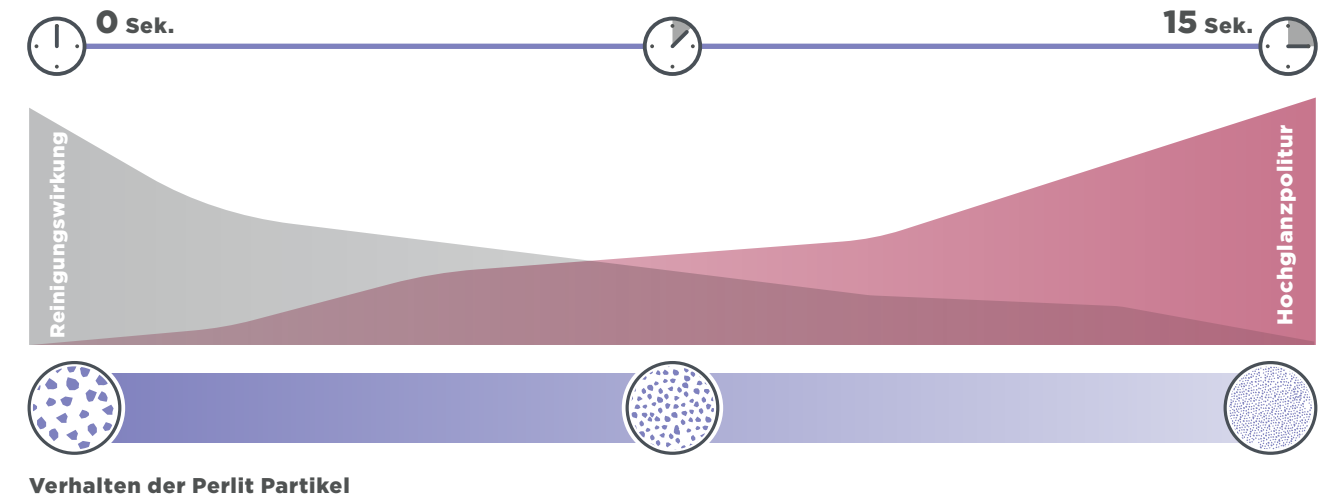

Reinigung

Beim ersten Auftragen von Cleanic auf den Zahn verhält es sich wie eine grobe Paste. Dabei hat Cleanic seine volle Reinigungskräfte.

Politur

Unter Belastung und innerhalb von Sekunden werden die abrasiven Partikel zerlegt und ihre schneidenden Kanten abgerundet und stumpfer. Jetzt setzt die Wirkung der Paste für die Hochglanzpolitur ein.

Die Verwendung von Cleanic

Tragen Sie die Cleanic-Paste nur auf eine begrenzte Anzahl von Zähnen (etwa 3 Zähne) mit einem Gummikelch auf (z. B. Pro-Cups), um in nur einem Schritt von der Reinigung zur Politur zu arbeiten. Anschließend applizieren Sie eine frische Portion Cleanic-Paste, um die nächste Gruppe von Zähnen zu behandeln.

Für normale Bezahnung:

Arbeiten Sie von der inzisalen/okklusalen Oberfläche jedes Zahnes zur Gingivaregion; dies minimiert die Abrasion am Zahn.

Für freiliegende Dentin- oder Wurzeloberflächen:

Beginnen Sie durch Applikation einer frischen Portion Paste auf die Schmelzoberfläche. Arbeiten Sie mit der gebrauchten Paste in Richtung freiliegende Wurzel- oder Dentinoberflächen (so ist sie weniger aggressiv).


Bestellen Sie **Cleanic** jetzt!

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Fluorid	RDA	REA	Geschmack	Menthol	Farbe der Paste
3310	Cleanic Cartridge Refill Packs	200g	0.15% CaF	21	3.4	Minze	ja	hellblau
3330	Cleanic Cartridge Refill Packs	100g	0.15% CaF	21	3.4	Minze	ja	hellblau
3210	Cleanic Cartridge Refill Packs - ohne Fluorid	200g	-	21	3.4	Minze	ja	hellblau
3230	Cleanic Cartridge Refill Packs - ohne Fluorid	100g	-	21	3.4	Minze	ja	hellblau
3340	Cleanic Single Dose	200x 2g	0.10% NaF	21	3.4	Minze	ja	dunkelblau
3380	Cleanic in der Tube Mint	100g	0.10% NaF	21	3.4	Minze	ja	blau
3382	Cleanic in der Tube Green Apple	100g	0.10% NaF	21	3.4	Apfel	nein	grün
3183	Cleanic in der Tube Mint ohne Fluorid	100g	-	21	3.4	Minze	ja	hellblau
3384	Cleanic in der Tube Light	100g	0.10% NaF	21	3.4	--	nein	hellblau
3386	Cleanic in der Tube Berry Burst	100g	0.10% NaF	21	3.4	Beeren	nein	pink

Testen Sie Cleanic mit seinen idealen Partnern!

Pro-Cup und Pro-Cup Junior


Das laminierte Profil dieser Einweg-Kelche hilft, die Bildung von Spritzkugeln bei der Applikation der Prophy-Paste zu vermeiden. Das gleiche Profil trägt auch dazu bei, eine Überhitzung zu begrenzen. Pro-Cup und Pro-Cup Junior enthalten kein Naturlatex.

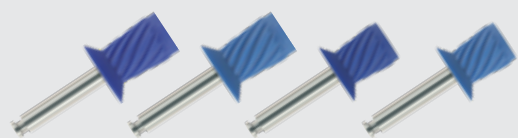

Artikel-Nummern & Stückzahlen				Farbe	Beschreibung	Typ		Single Use
Art.-Nr.	St.	Art.-Nr.	St.			Latch	Screw	
Pro-Cup								
990/30	30	990/120	120	●	Pro-Cup - Soft	✓		✓
991/30	30	991/120	120	●	Pro-Cup - Hart	✓		✓
1810/30	30	1810/120	120	●	Pro-Cup - Soft		✓	✓
1811/30	30	1811/120	120	●	Pro-Cup - Hart		✓	✓
Pro-Cup Junior								
992/30	30	992/120	120	●	Pro-Cup Junior - Soft	✓		✓
993/30	30	993/120	120	●	Pro-Cup Junior - Hart	✓		✓
1812/30	30	1812/120	120	●	Pro-Cup Junior - Soft		✓	✓
1813/30	30			●	Pro-Cup Junior - Hart		✓	✓

Pastenträger von Kerr

Ring pots für den einmaligen Gebrauch und sterilisierbare, wiederverwendbare Prophy Clips.

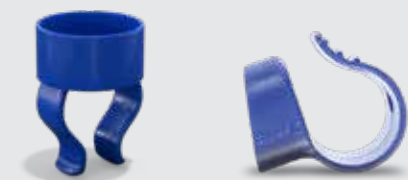

Ring Pots - Nicht sterilisierbar

Art.-Nr.	Beschreibung
985	Ring Pots - Blau - Packung mit 100 Stück
986	Ring Pots - Gemischte Farben - Packung mit 100 Stück

Prophy Clips - Sterilisierbar

Art.-Nr.	Beschreibung
3151	Prophy Clips - Packung mit 6 Stück

Für mehr Information besuchen Sie [kerrdental.com](https://www.kerrdental.com)