

Abformlösungen

Imprint™ 4 Preliminary

VPS Situationsabformmaterial



Ihre Alginat-Indikationen
verdienen das Beste

3M ESPE

Imprint™ 4 Preliminary

VPS Situationsabformmaterial

Zeit, mit verstaubten Gewohnheiten zu brechen.

Wo Alginate zahlreiche langwierige und staubige Arbeitsschritte erfordern, liefert Imprint 4 Preliminary ganz bequem eine genaue und dimensionsstabile Abformung, die mehrmals ausgegossen werden kann. Und bei automatischem Mischen mit dem Pentamix™ System wird die gesamte Prozedur noch schneller, berechenbarer und komfortabler.

		Maximale Verarbeitungszeit in Minuten (23 °C)	Konstante intra- orale Abbindezeit in Minuten (37 °C)
SCHNELL	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick	1:00	1:30
NORMAL	Imprint™ 4 Preliminary Penta™	1:30	2:00

Indikationen:

- Abformungen für temporäre Kronen und Brücken
- Gegenkieferabformungen
- Studienmodellabformungen
- Situationsabformungen
- Orthodontische Abformungen
- Abformungen für individuelle Löffel oder Schienen im Rahmen der Zahnaufhellung (Bleaching) und Knirscherschienen

Imprint™ 4 Preliminary VPS-Material bietet Ihnen:

- ▶ **Ein zeitsparendes und sauberes Automix-Verfahren**
für schnelles und einfaches Mischen, hohe Mischqualität und genaue Situationsabformungen
- ▶ **Langzeitstabilität und Ausgießen, so oft Sie wollen**
für mehr Flexibilität und Effizienz
- ▶ **Mehrfaches Ausgießen ohne Verlust an Genauigkeit**
für einfache Neuanfertigung von Modellen und Provisorien
- ▶ **Hydrophilie** für einfaches Modellausgießen; keine Oberflächen-Vorbehandlung nötig und hohe Qualität der Modelloberfläche
- ▶ **Einfache und gründliche Desinfektion**
für kompromisslose Hygiene
- ▶ **Frische Materialfarbe und Scanbarkeit**
für gute Lesbarkeit und leichten Zugriff auf den digitalen Workflow
- ▶ **Angenehmen Pfefferminzgeschmack**
für mehr Patientenkomfort



minary

Besser als Alginate

Imprint™ 4 Preliminary VPS-Material

Kein lästiges Handmischen, kein Saubermachen

Automatisches Mischen mit dem Pentamix™ System liefert auf Knopfdruck ein homogenes, blasenfreies Mischergebnis – in reproduzierbarer Qualität und in exakt der benötigten Menge.

Langzeitstabilität und mehrfaches Ausgießen, wann immer Sie wollen

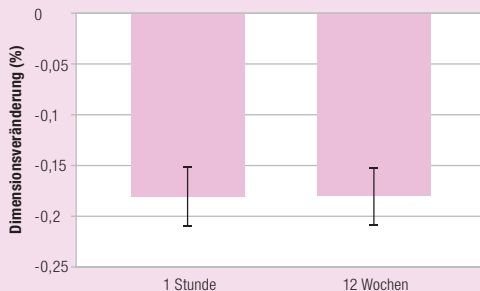


Abb. 1: Dimensionsveränderung einer mit Imprint™ 4 Preliminary VPS-Material hergestellten Abformung nach 1 Stunde und nach 12 Wochen. Quelle: Interne Untersuchungen von 3M ESPE. Daten auf Anfrage bei 3M ESPE erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite.

Die Abformungen zeigen praktisch keine Dimensionsveränderung über einen Zeitraum von 3 Monaten und können ausgegossen werden, so oft und wann immer es erforderlich ist. Das ermöglicht die einfache Neuanfertigung von Modellen und Provisorien.

Volle Infektionskontrolle

Die Abformungen können gründlich desinfiziert werden – ohne das Risiko von Ungenauigkeiten aufgrund von Dimensionsveränderungen. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über kontaminierte Abformungen.

Zwei, die perfekt zusammenarbeiten: Imprint 4 Preliminary VPS-Material & Protemp™ 4 Temporäres Kronen- und Brückenmaterial

Das Hochleistungsmaterial für alle abformbasierten Provisorien

Ein starkes Team, um ein gut sitzendes Provisorium mit geringer Schmierschicht und glatter Oberfläche herzustellen, das sich leicht aus der Abformung entnehmen lässt – einfaches Polieren inbegriffen. Sie und Ihre Patienten profitieren von einem zuverlässig stabilen Provisorium mit einer Ästhetik, die glücklich macht.

Alginate

- Zahlreiche zeitraubende Arbeitsschritte
- Staubige Handmischprozedur
- Uneinheitliche Mischqualität

- Alginateabformungen sollten sofort ausgegossen werden, da sie schnell schrumpfen
- Sie können nur einmal ausgegossen werden

- Alginateabformungen lassen sich nicht sehr wirkungsvoll desinfizieren
- Die Desinfektion kann auch zu Dimensionsveränderungen führen



Treffen Sie Ihre Wahl für die Effizienz Ihrer Praxis:

SCHNELLSTES UND KLEINSTES GERÄT AUF DEM MARKT!

Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät: das Spitzen-Automixsystem von 3M ESPE.



TRAGBAR, DAS LEICHTESTE GERÄT ÜBERHAUPT!

Pentamix Lite Automatisches Mischgerät: das Einstiegsmodell mit komfortabler Mischgeschwindigkeit.

Ein weiteres Plus: der 3M™ ESPE™ Abformlöffel.

Löffeladhäsiv überflüssig – der 3M ESPE Einweglöffel ist gebrauchsfertig und spart Zeit: Wählen Sie einfach die passende Löffelgröße (S, M oder L) und befüllen Sie den Löffel direkt aus dem Mischgerät.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Produktinformation
Value Packs	
71523	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ 6 Basispasten à 300 ml, 6 Katalysatoren à 60 ml
71524	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick 6 Basispasten à 300 ml, 6 Katalysatoren à 60 ml
Refills	
71521	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
71522	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
3M™ ESPE™ Abformlöffel Refills (jedes enthält 10 Löffel)	
71615	Größe S, Oberkiefer
71616	Größe M, Oberkiefer
71617	Größe L, Oberkiefer
71618	Größe S, Unterkiefer
71619	Größe M, Unterkiefer
71620	Größe L, Unterkiefer
Pentamix™ Automatisches Mischgerät	
77903	Pentamix™ Lite Automatisches Mischgerät – 230 V 50 Hz INT 1 Pentamix™ Lite – 230 V 50 Hz INT, 1 leere Kartusche für alle 3M ESPE Abformmaterialien im Schlauchbeutel, Gebrauchsanweisung
77871	Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät – 230 V (Westeuropa) Pentamix™ 3 – 230 V (Western Europe), 1 leere Kartusche für alle 3M ESPE Abformmaterialien im Schlauchbeutel, Gebrauchsanweisung

Art.-Nr.	Produktinformation
Zubehör	
71525	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Kartusche für Pentamix™ 2
71526	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick Kartusche für Pentamix™ 2
71527	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick Kartusche für Pentamix™ 3
71528	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick Kartusche für Pentamix™ 3
77944	1 Penta™ Kartusche für Pentamix™ Lite
77949	50 Penta™ Mischkanülen rot
Protemp™ 4 Temporäres Kronen- und Brückenmaterial	
46953	Intro Kit – A2 1 Kartusche – 50 ml, A2; 16 Garant™ Mischkanülen, blau; 1 Garant™ Dispenser 10:1, technische Richtlinien, Gebrauchsanleitung
Refills (jedes Refill enthält 1 Kartusche – 50 ml, 16 Garant™ Mischkanülen, blau; Gebrauchsanleitung)	
46959	Bleach
46954	A1
46956	A2
46957	A3
46972	A3.5
46960	B3

Imprint™ 4 Preliminary VPS-Material ist Teil der erfolgreichen Familie von Imprint 4 VPS-Abformmaterialien. **Testen Sie auch die vielseitige Palette an Imprint 4 VPS-Materialien für Ihre alltäglichen Präzisionsabformungen sowie Imprint 4 Bissregistrierungsmaterial.**



3M ESPE

3M Deutschland GmbH
Standort Seefeld
3M ESPE - ESPE Platz
82229 Seefeld
Freecall: 0800 - 2 75 37 73
Freefax: 0800 - 3 29 37 73
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.de

3M (Schweiz) AG
3M ESPE Dental Products
Eggstr. 93 - CH-8803 Rüschlikon
Telefon: (044) 724 93 31
Telefax: (044) 724 92 38
3mespech@mmm.com
www.3MESPE.ch

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: (01) 86 686 434
Telefax: (01) 86 686 330
dental-at@mmm.com
www.3MESPE.at

3M, ESPE, Garant, Imprint, Penta und Pentamix sind Marken von 3M Company oder 3M Deutschland GmbH. Alle anderen Marken gehören anderen Unternehmen.
©2014, 3M. Alle Rechte vorbehalten.
70210001676/01 (04.2014)