



VOCO Profluorid® Varnish

FLUORIDHALTIGER LACK ZUR ZAHNDESENSIBILISIERUNG

VOCO Profluorid® Varnish

STARKE WIRKUNG

Hypersensitivität

Empfindliche Zähne sind ein in der Bevölkerung weit verbreitetes Problem. Sie verursachen beim Patienten meist temporäre Schmerzen, die gegenüber dem Behandler nicht immer erwähnt werden.


Die Ursache für Hypersensibilität sind in aller Regel offene Dentintubuli. Daher ist es Ziel der Behandlung, diese langfristig zu verschließen.

Indikationen

Profluorid Varnish ist ein fluoridhaltiger Lack zur Behandlung von Hypersensibilität. Nach Kavitätenpräparationen oder bei empfindlichen Zahnhälsen werden die freiliegenden Dentintubuli effektiv versiegelt.

Zusammensetzung und Wirkung von VOCO Profluorid® Varnish


Profluorid Varnish ist ein kolophoniumbasierter Lack mit einem Natriumfluoridgehalt von 5 % (entspricht 22.600 ppm Fluorid). Das Fluoridion bewirkt zusammen mit in den Tubuli angereicherten Calciumionen eine Fällung von Calciumfluorid, die zum sicheren Verschluss der Tubuli führt. Eine Anwender-

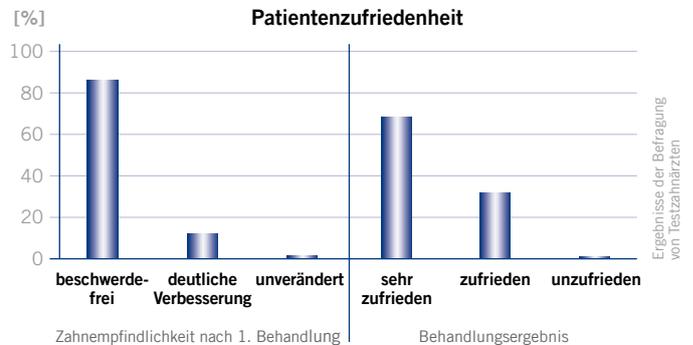

befragung ergab, dass über 85 % der Patienten bereits nach der ersten Behandlung mit Profluorid Varnish absolut schmerzfrei gewesen sind.

Neben dem schnellen Verschluss der Dentintubuli bewirkt Profluorid Varnish die Bildung von Calciumfluoriddepots an der Zahnoberfläche, die den Zahn vor Säureattacken schützen, die Remineralisierung fördern und langfristig zur Bildung von Fluorapatit beitragen.

Weiterhin ist dem Lack Xylitol beigegeben. Neben seiner geschmacksverbessernden Eigenschaft besitzt Xylitol eine nachgewiesene kariostatische Wirkung.

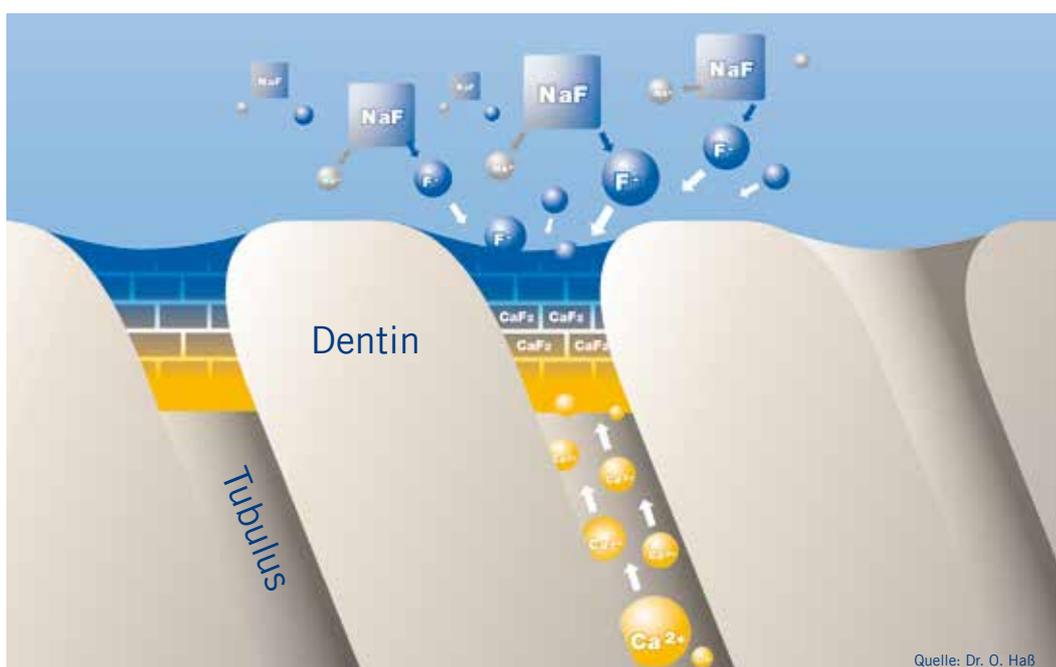

VOCO Profluorid® Varnish


EINFACH UND ÄSTHETISCH

Leichte Anwendung

Die Kolophoniummatrix von Profluorid Varnish ermöglicht eine gute Haftung auch an feuchten Oberflächen. Eine vorherige Trocknung der zu behandelnden Flächen ist demnach nicht notwendig, so dass die Anwendung sehr zeitsparend ist. Dadurch wird die Kooperationsbereitschaft von Patienten mit geringer Compliance (z.B. Kinder) gesteigert.

Ästhetik und Geschmack

Profluorid Varnish ist ein zahnfarbener Lack, der die Ästhetik nicht beeinträchtigt. Profluorid Varnish ist in vier angenehmen Geschmacksrichtungen erhältlich: Melone und Kirsche insbesondere für Kinder und jüngere Patienten, Minze als klassischer Geschmack vor allem für Erwachsene, und Karamell als der eher exotische Geschmack. Mit den vier raffinierten Geschmacksrichtungen können Sie noch mehr Service bieten und individuell auf Ihren Patienten eingehen.

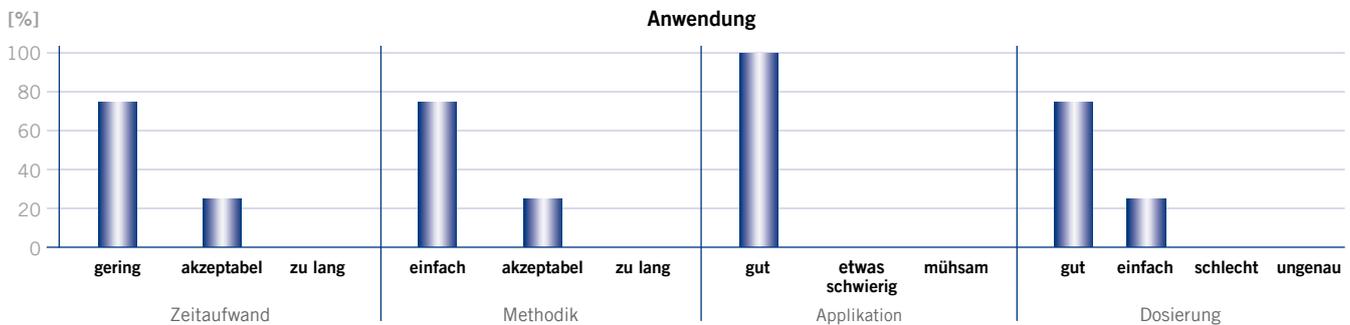

Ergebnisse der Befragung von Testzahnärzten

Meinung von Zahnärzten

Zahnärzte, die das Produkt anwenden, attestieren Profluorid Varnish durchweg gute Handling- und ästhetische Eigenschaften, wobei das Gros der Anwender sogar einen deutlichen Vorteil zu Wettbewerbsprodukten feststellt. Ebenso gut schneidet Profluorid Varnish im Votum der Patienten ab. Fast alle Befragten sind nach der Behandlung beschwerdefrei oder bestätigen eine deutliche Verbesserung.

Profluorid Varnish: weit mehr als eine Frage des guten Geschmacks!

Die Vorteile der SingleDose

Der Blister der Profluorid Varnish *SingleDose* enthält einen Pinsel und den Lack, womit ein hygienisch einwandfreies Produkt zur Anwendung gebracht wird.

Einfache und ästhetische Desensibilisierung mit VOCO Profluorid® Varnish:



Anwendung der Zylinderampulle



VOCO Profluorid® Varnish

SIE HABEN DIE WAHL

Indikationen

Behandlung von hypersensiblen Zähnen
 Versiegelung der Dentintubuli nach Kavitätenpräparationen
 oder bei empfindlichen Wurzeloberflächen

Produktvorteile

- Problemlose Anwendung auf feuchten Oberflächen
- Ästhetische, weiß-transparente Zahnfarbe
- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF \approx 22.600 ppm Fluorid)
- In vier Geschmacksrichtungen erhältlich: Melone, Minze, Kirsche und Karamell

Vorteile der SingleDose

- Produkt und Applikator in der hygienischen Einwegverpackung
- Ohne zusätzliche Halterung verwendbar
- Auslaufsicher in jeder Position

Vorteile der Zylinderampulle

- Mehrfache Verwendung durch Einsatz von Einwegkanülen
- Punktgenaue Applikation
- Einfachste approximale Anwendung
- Komplette Fluoridapplikation in nur einem Zug



Handelsformen

Geschmack	SingleDose 48 x 0,40 ml	SingleDose 50 x 0,25 ml	SingleDose 50 x 0,40 ml	SingleDose 200 x 0,40 ml	Tube 10 ml	Tube 50 ml	Zylinderampulle 5 x 1,70 ml
Melone	–	REF 1268	REF 1269	REF 1271	REF 1271	REF 1272	REF 2235
Karamell	–	–	REF 2226	REF 2229	REF 2229	–	–
Kirsche	–	–	REF 2227	REF 2230	REF 2230	–	–
Minze	–	–	REF 2228	REF 2231	REF 2231	–	–
Mixed	REF 2225	–	–	–	–	–	–
REF 2167	Applikationskanülen Typ 43 für Zylinderampullen, 100 Stk.						

VOCO GmbH
 Anton-Flettner-Straße 1-3
 27472 Cuxhaven
 www.voco.de

VOCO-Kundenservice
 Tel.: +49 (0) 4721-719-1111
 Fax: +49 (0) 4721-719-109
 service@voco.de

Zu beziehen durch: