

ENDO SUCCESS

Canal Access Prep

NEU

Minispitzen mit Mikroschneide



F88180

3 CAP-Spitzen (CAP1, CAP2, CAP3),
1 Universalschlüssel,
komplett mit Edelstahl-Box

Spitzenlösung für einen perfekten Zugang

- Hohe Leistungsstärke •
- Sicher, schnell und präzise •

ENDOSUCCESS

Canal Access Prep

Für den Erfolg einer endodontologischen Behandlung muss eine einwandfreie Zugangskavität angelegt werden.

Das Ultraschallspitzen-Kit „EndoSuccess Canal Access Prep“ (CAP) enthält drei spezielle Spitzen mit Mikroschneiden, die eine optimale Lokalisierung und Freilegung versteckter bzw. verkalkter Wurzelkanäle sowie ein effizientes Präparieren und Finieren der Zugangskavität ermöglichen.

CAP1

Finieren der Seitenwände der Zugangskavität

Minispitze mit Mikroschneide und **inaktivem Endstück**, um das Risiko einer Perforation des Pulpakammerbodens zu vermeiden, beseitigt wirksam Zement- und Dentinrückstände, wodurch gleichmäßige Kanalwände entstehen.



Ref. F88181

CAP2

MB2-Zugang und Auffinden versteckter Kanäle

Spitze mit Mikroschneide und **aktivem Endstück** zur Lokalisierung vierter und versteckter Kanäleingänge, ermöglicht den direkten Zugang zum MB2-Kanal (2. mesiobukkaler Kanal) an den ersten oberen Molaren und zu anderen Kanälen. Reinigung des Pulpakammerbodens und Freilegung der mesialen Kanäle.



Ref. F88182

CAP3

Freilegung von Wurzelkanälen

Minispitze mit Mikroschneide und **aktivem Endstück**, die speziell vorgesehen ist zur Lokalisierung der Kanäleingänge und zum koronalen Eröffnen von Kanälen, zur Entfernung von Kalkablagerungen und Dentinegewebe (wie Pulpasteine, Dentinüberhänge und Füllungsmaterialien) sowie zum Lockern von Wurzelstiften.



Ref. F88183

Empfohlene Leistungseinstellungen:

• P-5 NEWTRON/P5 NEWTRON XS: 10 - 12 • P-MAX NEWTRON XS: 6 - 8

Aufgrund der aggressiven Spitze muss die Handhabung der CAP3 mit Vorsicht erfolgen, um eine Perforation des Pulpakammerbodens zu vermeiden.

SATELEC
ACTEON