



roeko
Stay-put



roeko
Comprecord



PerFect® TCS II
Tissue Contouring System



AFFINIS® PRECIOUS



**Magic
FoamCord®**

Comprecap
anatomic



roeko
Retracto

Viele Wege führen zu einem perfekten Abdruck...

mit dem Gingiva Management System von Coltène/Whaledent

Das **Gingiva Management System**

dient als Grundlage für ästhetisch einwandfreie und dauerhaft gute restaurative und prothetische Arbeiten. Die Art der prothetischen bzw. restaurativen Arbeit, sowie der Zustand des Gewebes verlangen unterschiedliche Bearbeitungsmethoden. Dazu zählen unter anderem:

- › die mechanische Gewebeverdrängung, die meist mit Hilfe von Retraktionsfäden bewerkstelligt wird und
- › die Elektrochirurgie

Eine gute Abdruckvorbereitung ist die Basis für exakte Abformungen, welche letztendlich Voraussetzung für eine optimale Passgenauigkeit der Arbeiten von Zahntechnikern darstellen.

Mit dem Gingiva Management System von Coltène/Whaledent steht Ihnen für jede Indikation eine passende Lösung zur Verfügung:

- › Elektrochirurgie
- › Retraktionsfäden
- › Retraktionsfadenstopfer
- › Gingiva Liquid
- › Magic FoamCord®
- › Comprecap/Comprecap anatomic

Elektrochirurgie

ein System für die einfache und klinisch bewährte Gewebekonturierung.

Anwendungsgebiete:

- › Rekonturierung der Gingiva für ästhetisch perfekte Restaurationen
- › Für einen optimalen Zugang zu subgingivalen Präparationsgrenzen
- › Kontrolle von Blutungen vor der Abdrucknahme
- › Erweiterung des Sulkus
- › Freilegung eingewachsener Zähne

Durch den effizienten Einsatz der Elektrochirurgie erreicht man ein sauberes und trockenes Präparationsumfeld mit ausgezeichnetem Zugang und einem unkomplizierten Heilungsverlauf. Die Abdrucknahme kann in der selben Sitzung vorgenommen werden.

Vorteile:

- › sofortige Blutstillung nach chirurgischen Schnitten
- › weitgehend schmerzfreie Wundheilung
- › minimale Traumatisierung der Gingiva

whaledent®



PerFect® TCS II

Tissue Contouring System

Das PerFect® TCS II bietet eine lückenlose Auswahl an Elektroden für die verschiedenen Indikationen. Insgesamt 8 unterschiedliche Elektroden - alle für die Sterilisation im Autoklaven geeignet - stehen dem Zahnarzt zur Verfügung.

- › Koagulationskugel
- › 45° gerader Schnitt
- › 45° konischer Schnitt
- › gerade runde Schlaufe
- › 45° lange Schlaufe
- › gerade lange Schlaufe
- › 45° Diamant Schlaufe
- › 90° AP 1½

Das PerFect® TCS II Gerät hat einen Schneide- und einen Koagulationsmodus, überzeugt durch sein kompaktes Design und die einfache Bedienung.

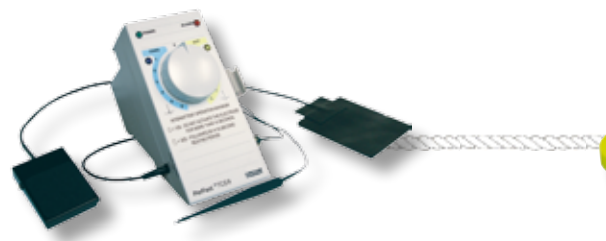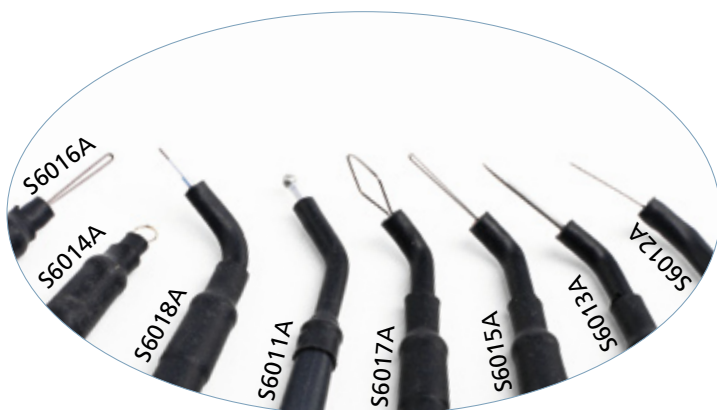


roeko Stay-put imprägniert

Stay-put imprägniert kombiniert auf ge-
niale Weise die Qualität eines geflochtenen
Retraktionsfadens mit der Form-
barkeit eines hauchdünnen Drahtes.


Stay-put imprägniert:

- › stoppt Blutungen schnell und effektiv
- › behält die Vorformung
- › verrutscht nicht
- › bietet einen guten Kontrast zur
Gingiva
- › ist mit Aluminiumchlorid imprägniert,
dadurch keine Kreislaufbeeinträchti-
gungen

Stay-put ist auch nicht imprägniert er-
hältlich und kann wahlweise individuell
imprägniert werden.

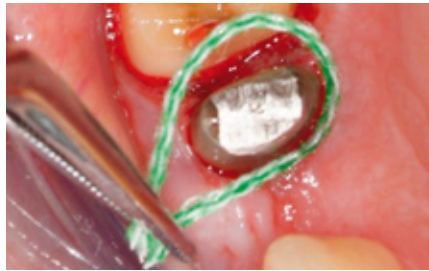

Zuerst die Fadenmitte in den Sulkus legen

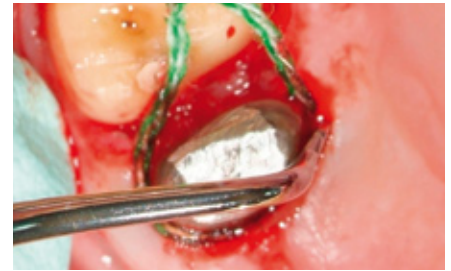

Dann den Faden von der Mitte aus in den
Sulkus stopfen



Stay-put imprägniert für 1-3 min. im Sul-
kus belassen



Resultat: ein weit geöffneter Sulkus



Ausgangssituation:
geschlossener Sulkus



Comprecord mit Retraktionsfadenstopfer
in den Sulkus stopfen



Den nicht imprägnierten Faden für min-
destens 5 Minuten im Sulkus belassen



Comprecord entfernen.
Der Sulkus ist nun weit geöffnet und für
die Abformung vorbereitet

roeko Retracto

Retracto ist geflochten oder gedreht
sowohl imprägniert (mit Aluminium-
chlorid-Hexahydrat) als auch nicht im-
prägniert lieferbar.

roeko Retraktionsfadenstopfer

Doppelendige Handinstrumente aus
Edelstahl zum leichten Legen von Re-
traktionsfäden.

roeko Gingiva Liquid

Adstringierende, blutstillende Lösung
mit 10 % Aluminiumchlorid-Hexahy-
drat zum Imprägnieren von Retrakti-
onsfäden.






Ausgangssituation, geschlossener Sulkus



Auswählen und Anprobe des Comprecap anatomic

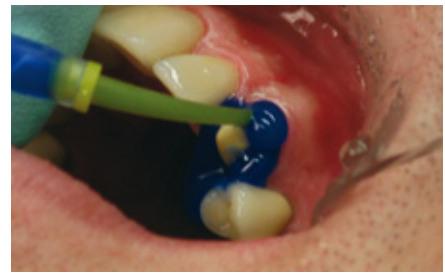

Magic FoamCord® um den präparierten Zahn und angrenzende Gingiva applizieren



Aufsetzen des Comprecap anatomic. Dieses wird durch den Gegenbiss des Patienten gehalten



Nach 5 min Mundverweildauer ist Comprecap anatomic mit Magic FoamCord® in einem Stück leicht entfernbar



Weit erweiterter Sulkus mit klarem Zugang zu den präparierten Rändern

Comprecap^{anatomic}

Anatomisch geformte Kompressionshütchen, die durch die halbkreisförmigen Ausstanzungen an zwei gegenüberliegenden Seiten optimal an die Anatomie der Zahnreihe angepasst sind:

- › stillen Blutungen auf natürliche Weise – durch Kompression
- › trocknen Zahnstümpfe
- › schaffen präzise erkennbare Präparationsgrenzen
- › lassen sich durch die dünnen Wandstärken leicht auf benachbarte Zähne aufsetzen
- › die ebene Grundfläche bietet dem Patienten eine optimale Bissfläche
- › durch die glatte Bissfläche wird der Druck beim Zubeißen präzise auf das Retraktionsmittel übertragen

Magic FoamCord®



5 min

Das Material ist nach 5 min komplett abgebunden. Die maximale Ausdehnung von Magic FoamCord® beträgt 160 %.

Erster expandierender A-Silikonschaum zur Sulkuserweiterung ohne Faden.

- › erweitert selbstständig den Sulkus, ohne invasive Materialien oder Techniken
- › keine traumatisierende Wirkung
- › einfache und schnelle Applikation direkt um den präparierten Zahn
- › patientenfreundlich
- › beinhaltet keine Hämostatika, die das Abformmaterial kontaminieren könnten, somit kein zeitintensives Spülen notwendig
- › ausgezeichnet erweiterter Sulkus, bereit für die Abformung





Bestellinformation:

PerFect® TCS II Gerät

- 1 × PerFect® TCS II Tissue Contouring System
- 3 × Sterilisierbare Elektrodenhandstücke (S7010A)
- 1 × Anschlussleitung (S6008A oder S6008CE)
- 1 × Handstückhalter (S7001)
- 1 × Fußpedal (S5005)
- 1 × Steuerelektrode und Kabelsatz (S204 oder S204CE)
- 1 × Klinisches Anleitungsvideo
- 1 × Handbuch

Ausführung	REF
110 V	S8100
115 V	S8115
230 V CE	S8230 CE
230 V CE UK	S8230 UK
240 V	S8240

Zubehör	REF
Neutralelektrode	S204 CE
Fußschalter	S5005
Kabelanschluss	S6008A CE
Handstückhalter	S7001

Elektrodenhandstücke	REF
Kompl. Satz mit 8 Elektrodenhandstücken	S6010A
Satz mit 3 Elektroden	S7010A
S6011A, S6012A, S6015A	
2 × Koag. Kugel	S6011A
2 × 45 Grad, gerader Schnitt	S6012A
2 × 45 Grad, konischer Schnitt	S6013A
2 × gerade, runde Schlaufe	S6014A
2 × 45 Grad, lange Schlaufe	S6015A
2 × Gerade lange Schlaufe	S6016A
2 × 45 Grad „Diamant“ Schlaufe	S6017A
2 × 90 Grad AP 1½	S6018A

Stay-put	Nicht Imprägniert	REF
x-fein	183 cm	521 000
fein	183 cm	521 001
mittel	183 cm	521 002
stark	183 cm	521 003

Stay-put	Imprägniert	REF
x-fein	183 cm	521 020
fein	183 cm	521 021
mittel	183 cm	521 022
stark	183 cm	521 023

Comprecord		
x-fein	225 cm	515 000
fein	225 cm	515 001
mittel	225 cm	515 002
stark	225 cm	515 003

Retracto Braided (geflochten)		
Imprägniert		
fein	225 cm	510 001
mittel	225 cm	510 002
stark	225 cm	510 003

Retracto Braided	Nicht imprägniert	
x-fein	225 cm	511 000
fein	225 cm	511 001
mittel	225 cm	511 002
stark	225 cm	511 003

Retracto Twisted (gedreht)		
Imprägniert		
fein	225 cm	522 001
mittel	225 cm	522 002
stark	225 cm	522 003



Retracto Twisted Nicht imprägniert

		REF
x-fein	225 cm	523 000
fein	225 cm	523 001
mittel	225 cm	523 002
stark	225 cm	523 003

Retraktionsfadenstopfer

glatt	1 Stk.	520 000
gezahnt	1 Stk.	520 001

Gingiva Liquid

10 ml	524 000
-------	---------

Magic FoamCord

Intro Kit 6735

- 2 x 50 ml Kartuschen
- 30 x MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*
- 30 x Oral Tips yellow
- 45 x Comprecap anatomic

Refill

2 x 50 ml Kartuschen 6737

Zubehör

- MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S 6550
- Oral Tips yellow 6555

Comprecap anatomic

Set 1/3/5	120 Stk.	531 299
-----------	----------	---------

Einzelgrößen

1	120 Stk.	531 201
3	120 Stk.	531 203
5	60 Stk.	531 205


Comprecap

Set 1/3/5	150 Stk.	530 000
-----------	----------	---------

Einzelgrößen

1	120 Stk.	530 008
1	600 Stk.	531 008
3	120 Stk.	530 010
3	600 Stk.	531 010
5	60 Stk.	530 014
5	400 Stk.	531 014

* MT = Mixing Tip
S = gerade

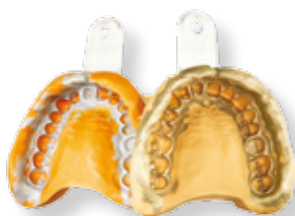

Für eine nahtlose Weiterbehandlung stehen Ihnen mit der AFFINIS® Familie hervorragende Materialien für eine präzise Abformung zur Verfügung.

Fordern Sie Informationsmaterial an oder besuchen Sie uns im Internet: www.coltenewhaledent.com

www.coltenewhaledent.com
© 2007 Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent